

zadako
wireless solutions



TRAVEL VARIX SYSTEM


ORIGINALE PRÄVENTION
VON „SCHWEREN BEINEN“



1. Schritt: TVS muss vor Anwendung aufgeladen sein. Maximale Ladezeit ist 6 Stunden. Maximale Anwendungszeit des Gerätes ist 6 Stunden.

2. Schritt: Das TVS muß das Knöchel straff umspannen und so mit dem Klettverschluß fixiert werden. Das Gerät ist mit Drücken des entsprechenden Knopfes (1, 2 oder 3 - Auswahl von Massage Niveau) in Betrieb gesetzt. Ausschalten erfolgt nach Drücken des Knopfes OFF.

Zum Herzen

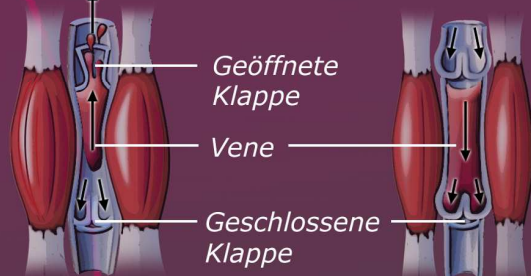

KONTRAHIERTER MUSKEL

ENTSPANNTER MUSKEL

Welche Kompression?

	Abend-schwellung Varikosität Telangiectasie	Varikose ohne Kompli- kation	Varikose mit Kompli- kation	Nach Sklero- therapie	Nach chirurgischem Eingriff	Geschwür von Vorknie (nach Schwellungs- resorption)	Haut- verände- rungen	Veneninsuffizienz in Schwangerschaft	Prävention tiefer Venen- trombose	Tiefe Venen- trombose	Postthrombo- tisches Syndrom	Lymphödem
10 - 15 mmHg	▲▲	▲▲						▲▲	▲▲			
15 - 20 mmHg		▲▲	▲	▲▲	▲▲			▲▲	▲▲			
20 - 36 mmHg			▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲	
> 36 mmHg							▲				▲	▲▲

Kompression mit elektronischer Druckmassage von unteren Varizen.